


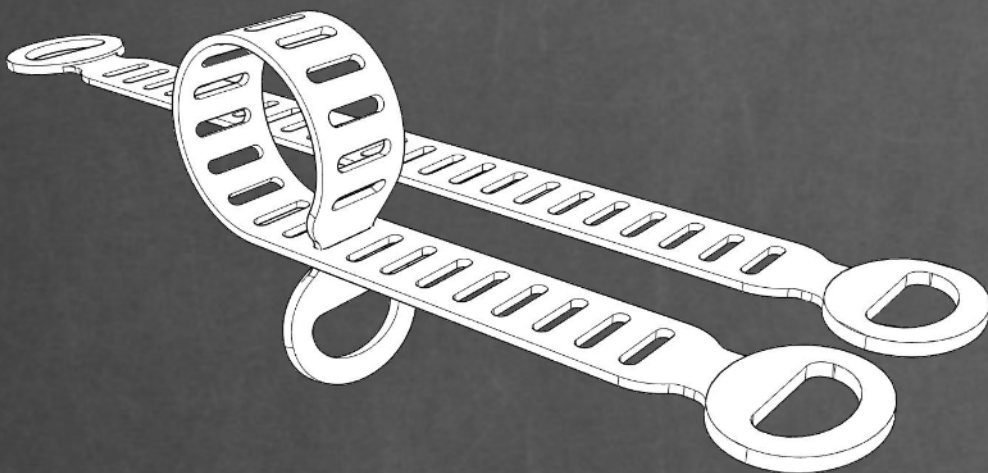

# *Earee, la fascetta Salva Orecchie in silicone per mascherine o altri DPI*

BREVETTATA, COMODA E SICURA


Patent pending 202020000002275



## ISTRUZIONI PER L'USO

**1.** Far passare le estremità di Earee attraverso gli elastici della mascherina e, toccando solo l'Earee, applicarla al viso.


**2.** Earee può essere agganciato secondo varie modalità:

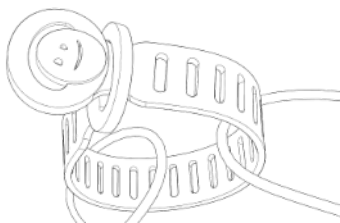

Per l'uso di tutti i giorni,  
inserire l'estremità con il logo  
all'interno di quella vuota



Per ottenere una maggiore  
adesione della mascherina al  
volto, inserire l'estremità vuota  
in una delle asole presenti  
lungo il corpo dell'Earee

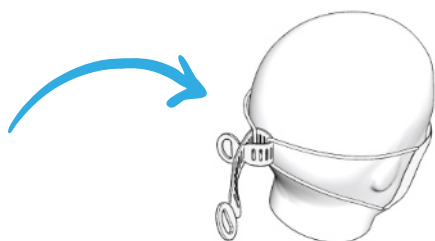

In alternativa, è  
possibile inserire  
**entrambe le estremità**  
dell'Earee nelle asole  
presenti lungo il corpo



**ATTENZIONE!** Per inserire le estremità nelle asole presenti lungo il corpo, ripiegarle su se stesse e inserirle/disinserirle nell'asola delicatamente.



**ATTENZIONE!** Earee è prodotto in silicone. È quindi dotato di proprietà elastiche sufficienti per il suo utilizzo, ma non è un elastico.





**ATTENZIONE!** Un inserimento/disinserimento scorretto può provocare la rottura dell'Earee.



3. Per togliere la mascherina, sfilarla toccando Earee per una maggiore protezione.

4. È possibile sanificare Earee con semplice bollitura o a freddo, con un qualsiasi sanificante, per poterla riutilizzare in tutta sicurezza.

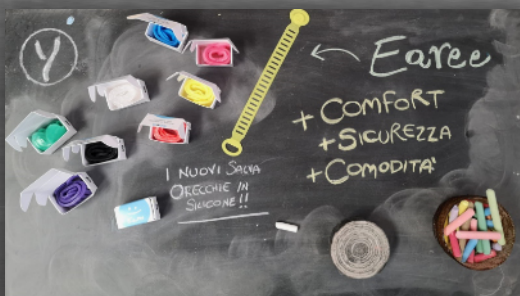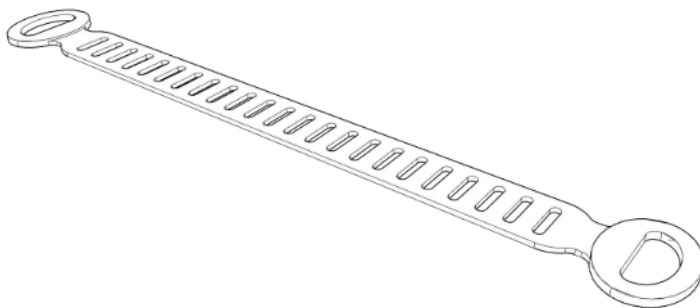

Earee è un prodotto di Syde srl

Sede legale in via Leonardo da Vinci 16 50132 Firenze (FI) Italia  
Sede operativa in piazza Costituzione 5 50041 Calenzano (FI) Italia  
P.Iva/VAT: IT 06538010486